

批量测试快速使用说明

1

点击主菜单“批量测试”按键，进入界面后选择对应样本类型：“血清”“血浆”“全血”或“其他”，在项目切换页

4 面选择对应项目名称。

根据设定的间隔时间加第二个样，加样后点击该样本对应当前状态下的“开始孵化”按键，以此类推。

2

设置间隔时间，扫描全部待测采血管条形码或通过“样本+1”按键依次增加样本编号并将检测卡一一对应，测试样本量不能超过最大样本量。

5

所有样本独立计时，仪器会在剩余1分钟时进行提醒。

3

依据不同项目吸取相应体积样本，垂直滴加至检测卡加样孔。点击该样本对应当前状态下的“开始孵化”按键，仪器开始倒计时。

6

将检测卡按正确方向插入KF-Q001-A干式荧光免疫分析仪的检测卡卡槽里，仪器会自动检测并上传或打印结果。

注：如有疑问，请与我们联系，联系电话：0755-85292519