

标准测试快速使用说明

1 **复温** 检测前将检测卡平衡至室温（15~30℃），并尽量在1小时内使用。注：铝塑封在平衡至室温后再开封。

2 **匹配** 确认SD质控卡与检测卡的批号相匹配，进行质控操作。

3 **加样** 点击主菜单“标准测试”按键进入界面后，扫描采血管条形码，选择样本类型，依据不同项目吸取相应体积样本，垂直滴加至检测卡加样处。

4 **自动检测** 按正确方向将检测卡平稳插入KF-Q001-A干式荧光免疫分析仪的检测卡卡槽里，仪器开始倒计时，倒计时结束仪器会自动检测并上传或打印结果。

注：如有疑问，请与我们联系，联系电话：0755-85292519