

质控操作流程

01

插入SD质控卡

取出试剂盒中的SD质控卡，插入 KF-Q001-A 干式荧光免疫分析仪的SD质控卡卡槽里。

02

导入质控信息

点击仪器主菜单“项目管理”按键进入项目管理界面，点击左下方“导入SD卡”按键，仪器开始导入质控信息。

03

查看结果

质控结果在5秒内出现在项目管理界面的表格内，该结果将长期储存在仪器内存中，同批次试剂使用过程中不必重新导入。

注： SD质控卡可拔出，新批次试剂应至少进行一次质控操作，且确保SD质控卡批号与试剂批号一致。如显示质控失败，请检查SD质控卡是否插好，若仍显示失败，请与我们联系，联系电话：[0755-85292519](tel:0755-85292519)